


## *Vorgehensweise Praxis:*

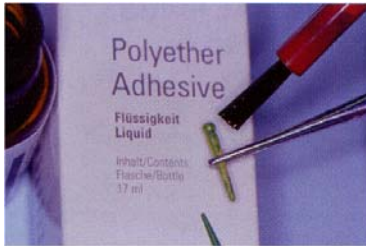

Zum Wurzelkanal passende Wurzelstiftgröße auswählen und zum besseren Haftverbund mit dem Abformmaterial bei der Abdrucknahme mit Monomer benetzen. Wurzelstifte in den Wurzelkanal einsetzen und Abdruck nehmen.

## *Vorgehensweise Labor:*



Zum Wurzelkanal passende Wurzelstiftgröße auswählen und bündig zum Wurzelstumpf abtrennen. Wurzelkappen in Wachs modellieren und Kugelankerprimärteile unter Beachtung der Einschubrichtung fixieren. Anstiften und Giessen wie gewohnt. Wurzelkappen ausarbeiten, dabei Kugeln schonend bearbeiten, um Dimensionsverlust zu vermeiden.

## *Fixierung der Matrize im Mund (Praxis):*



Entsprechende Bereiche in der Prothese freischleifen. Platzhalterscheiben (im Set beiliegend) über die Wurzelkappen legen und adaptieren. Matrizen aufsetzen. Freigeschliffene Bereiche in der Prothese mit Autopolymerisat füllen und Prothese eingliedern. Nach Ende der Polymerisation Platzhalterscheibe entfernen und eventuell entstandene Kanten beseitigen.



Servo-Dental GmbH & Co. KG  
Rohrstraße 30  
58093 Hagen-Halden  
Fon: +49 (0) 2331/9591-0  
Fax: +49 (0) 2331/9591-25  
www.servo-dental.de  
info@servo-dental.de