
Indikation

Das F.M.-Scharnier ist ein extrakoronales Halteelement für unilaterale Freiendprothesen. Es erlaubt eine Rotationsbewegung der Prothese nach distal und beugt somit einer schädigenden Belastung der Pfeilerzähne vor.

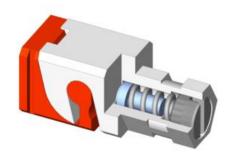


Vorteile

- Das F.M.-Scharnier besteht lediglich aus zwei Hauptbauteilen (Patrize und Matrize).
- Maße der Baugruppe: Länge: 8,5mm; Breite: 3,5mm; Höhe: 3,5mm
- Die Konstruktion des Scharniers verhindert ein ungewolltes Ausgliedern der Prothese.
- Spiralfeder und Bolzen können leicht ausgetauscht bzw. erneuert werden.

REF	ArtBezeichnung
66001	F.MScharnier komplett, Patrize Edelstahl/Matrize Edelstahl inkl. Platzhalter
66601	F.MScharnier-Matrize, Edelstahl (inkl. Bolzen, Spiralfeder und Schraube) inkl. Platzhalter
66701	F.MScharnier-Patrize, Edelstahl (anlötbar)
66742	F.MScharnier-Patrize, Kunststoff
66300	F.MScharnier-Ersatzteil-Set (4 Bolzen, 4 Spiralfedern, 4 Schrauben)


Bauteile

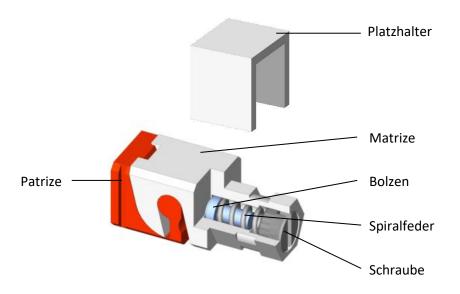

Verarbeitung





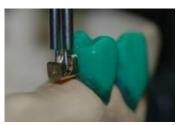

Für die Konstruktion sollten mindestens zwei Pfeilerzähne miteinander verblockt werden.







Die Patrize wird an der Konstruktion angebracht, wobei darauf zu achten ist, dass die Scharnierachse im rechten Winkel zum sagittalen und interalveolaren Verlauf des Kieferkammes steht.







Danach wird das Modellgussgerüst erstellt.







Die Aufstellung der Zähne erfolgt wie gewohnt, wobei maximal zwei Ersatzzähne vorgesehen werden sollten. Ebenso ist auf eine möglichst ausgedehnte Sattelgestaltung zu achten.







Zur Fertigstellung werden Matrize und Patrize zusammengesteckt und zwischen beide Gelenkteile etwas Vaseline gegeben. Dann wird der Platzhalter über das Scharnier geschoben und Unterschnitte mit Wachs ausgeblockt.







Die Umsetzung in Kunststoff erfolgt wie gewohnt. Zum Abschluss wird der Platzhalter entfernt.

Erklärung der verwendeten Symbole

	Hersteller
$\bigcap_{\mathbf{i}}$	Gebrauchsanleitung beachten
REF	Artikelnummer
LOT	Chargennummer
QTY	Menge
②	Nicht zur Wiederverwendung
NON	Unsteril

Hersteller

New Ancorvis srl Via dell'Industria 15 40012 Bargellino, Calderara di Reno Italien

Fon +39 (0) 51 6463070 Fax +39 (0) 51 6463076 newancorvis@libero.it www.newancorvis.eu

Vertrieb

Servo-Dental GmbH & Co. KG Rohrstraße 30 58093 Hagen Deutschland

Fon +49 (0) 23 31 / 95 91-0 Fax +49 (0) 23 31 / 95 91-25 info@servo-dental.de www.servo-dental.de